

## Nośnik montażowy FluoreGuard

**Opis:** FluoreGuard Mounting Medium jest rozpuszczalnym w wodzie medium przeznaczonym do półtrwałego nakrywania preparatów do szkiełek fluorescencyjnych. FluoreGuard wysycha do półsztywnej warstwy, która eliminuje uszkodzenia tkanek spowodowane przesuwaniem się szkiełek nakrywkowych i ułatwia długotrwałe przechowywanie.

**Zastosowania/ograniczenia:** Wyłącznie do diagnostyki in vitro.  
Zastosowania histologiczne.  
Robić nie Użyj przeszłej daty wygaśnięcia.  
Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z tymi odczynnikami.

**Dostępność:**

**Przedmiot #**

FMM030 powiedział:

FMM060 powiedział:

**Głośność**

Pojemność 30 ml


Pojemność 60 ml


**Składowanie:** Przechowywać w temperaturze pokojowej.



**Procedura:**

1. Nałóż kilka kropli FluoreGuard Mounting Medium i szkiełko nakrywkowe.
2. Pozostaw FluoreGuard do wyschnięcia na 30 minut przed view. Produkt wyschnie do postaci półstałej przez noc.
3. FluoreGuard jest podłożem wodnym i można go usunąć przez namoczenie w PBS przez noc.

**Środki ostrożności:** Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Umyć po użyciu. Przestrzegaj wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych przepisów środowiskowych dotyczących utylizacji.

Przechowywanie: 18°  
C  25° C

 Laboratoria ScyTek, Inc.  
205 Południe 600 Zachód  
Logan, UT 84321  
435-755-9848  
Stany Zjednoczone Ameryki

 Autoryzowany przedstawiciel w Europie  
 (Tylko kwestie regulacyjne)  
EmergoEurope (31)(0) 70 345-8570  
ul. Molsnstraat 15  
2513 BH Haga, Holandia